

NowCheck® COVID-19 Ag Control

Qualitätssicherung für den COVID-19 Antigen-Test

► Mit dem **NowCheck® COVID-19 Ag Control**, einer Qualitätskontrolle, überprüfen Sie die korrekte Durchführung und Leistung Ihrer NowCheck® COVID-19 Antigen-Tests. Das sind wichtige Voraussetzungen für korrekte Testergebnisse.

Der Inhalt von **NowCheck® COVID-19 Ag Control** besteht aus einer Positiv- und einer Negativ-Kontrolle, die wie echte Proben verwendet werden: einfach in das Probenfenster des Antigen Tests tropfen und das Ergebnis nach 15 Minuten ablesen. Da Sie vorher wissen, ob das Material positiv oder negativ ist, haben Sie sofort Gewissheit, ob die Testkomponenten funktionieren und Sie den Antigen-Test im Alltag korrekt durchführen.

Machen Sie einen Kontroll-Test:

- für jede neue Charge
- für jeden ungeübten Anwender
- für jede neue Lieferung von Testkits



✓
**Schnelle
Qualitäts-Kontrolle**

Ergebnisse in 15 Minuten

✓
**Unkomplizierte
Handhabung**

Kein Labor oder
zusätzliche Geräte erforderlich

✓
**Einfach
bestellen**

Auf shop.concile.de

Ergebnis	nach 15 Minuten
Packungsgröße	20er Box, mit 10 Positiv- und 10 Negativ-Kontrollen

Lagertemperatur 2–30 °C

Hersteller BioNote

Vertrieb concile GmbH


Im Lieferumfang

- 10 Positiv-Kontrollen (rotes Röhrchen)
- 10 Negativ-Kontrollen (transparentes Röhrchen)
- eine Gebrauchsanweisung


Nicht im Lieferumfang

- NowCheck® COVID-19 Ag Test


Einfache Testdurchführung

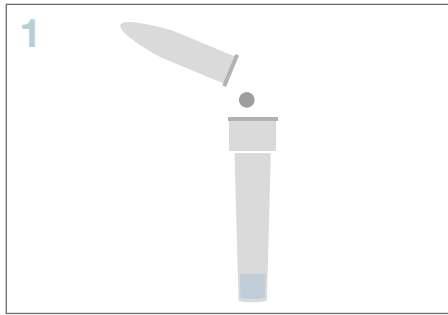


1
Tablette der Positiv- oder Negativ-Kontrolle in die Pufferlösung des NowCheck® COVID-19 Ag Tests geben.

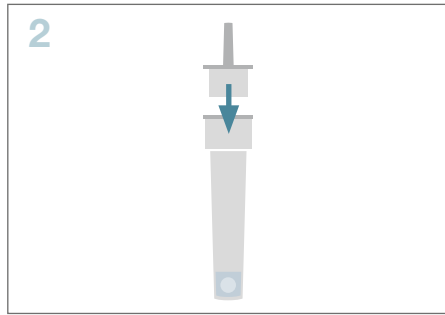


2
Tropfverschluss auf Pufferlösung setzen.

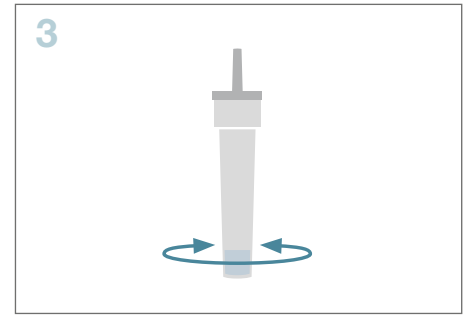

3
Tablette und Pufferlösung mischen, bis Tablette aufgelöst ist.

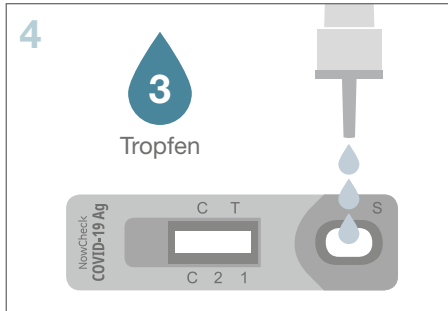

4
3 Tropfen der Kontrolllösung in das Probenfenster der Testkassette geben.*

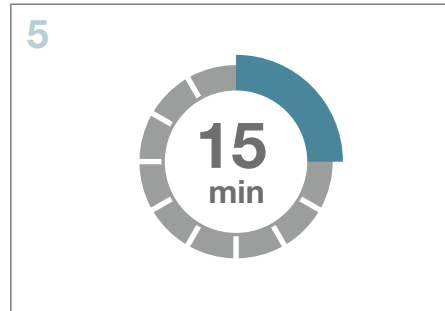


5
Ergebnis nach 15 Minuten ablesen.

Bestellen Sie NowCheck®
COVID-19 Ag Control jetzt auf
shop.concile.de

* Bitte beachten Sie, dass die Qualitätskontrollen mit einer unbenutzten NowCheck® AG Testkassette durchgeführt werden muss und diese Kassette nach der Durchführung der Qualitätskontrolle nicht wiederverwendet werden kann.


Interpretation der Testergebnisse

Positiv-Kontrolle

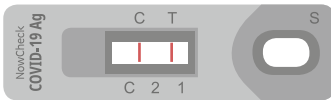

positives Ergebnis für Ag Test


► Antigen-Test funktioniert und wurde korrekt durchgeführt

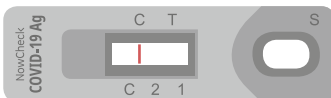

negatives Ergebnis für Ag Test


► Antigen-Test funktioniert nicht oder wurde nicht korrekt durchgeführt

Negativ-Kontrolle

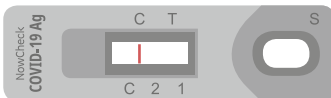

negatives Ergebnis für Ag Test


► Antigen-Test funktioniert und wurde korrekt durchgeführt

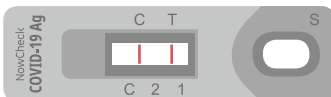

positives Ergebnis für Ag Test

► Antigen-Test funktioniert nicht oder wurde nicht korrekt durchgeführt

Bitte beachten Sie für die korrekte Durchführung der Qualitätskontrolle die ausführliche Gebrauchsinformation von **NowCheck® COVID-19 Ag Control**.

 **Hersteller:**
BIONOTE Co., LTD.
22, Samsung 1-ro 4-gil,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18449,
Republic of Korea

Vertrieb in Deutschland:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
D-79100 Freiburg, Germany

T +49 (0) 761 151474-0
F +49 (0) 761 151474-19

info@concile.de
www.concile.de


concile 